

πλαισο ●

Ανανεωμένη
έκδοση με
νέα προϊόντα

Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε χαμογελαστοί.

**Βρες όλα όσα
χρειάζεσαι για**

Μάσκες σελ.2

**Ατομική
Φροντίδα** σελ.8

**Προστασία &
καθαριότητα
χεριών** σελ.10

**Προστασία σε
Επαγγελματικούς
Χώρους** σελ.16

**Καθαριότητα
Επιφανειών** σελ.20



Ανάπνευσε “ελεύθερα”

Επιλέγουμε την ιατρική μάσκα προσώπου μιας χρήσης σε κάθε μας έξοδο. Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας. Οι μάσκες διαθέτουν πιστοποιητικό CE.



Η εφαρμογή της μάσκας πρέπει να γίνεται με καθαρά χέρια. Γι'αυτό το λόγο είναι σημαντικό να πλένεις και να απολυμαίνεις καλά τα χέρια σου πριν τη χρησιμοποίησεις.

Η σωστή χρήση της μάσκας σε 6 βήματα



1 Φόρεσε τη μάσκα, περνώντας τα 2 λάστιχα γύρω από τα αυτιά.



2 Φρόντισε να καλύπτει τελείως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι, χωρίς να αφήνεις κενά.



3 Για να τη σταθεροποιήσεις, πίεσε το μεταλλικό στοιχείο στη ράχη της μύτης.



4 Απόφυγε να ακουμπήσεις την μάσκα με τα χέρια σου, για όση διάρκεια τη φοράς.



5 Αφαίρεσε τη μάσκα, τραβώντας ταυτόχρονα τα δύο λάστιχα από τα αυτιά και απόρριψε την απευθείας στον κάδο.



6 Αφού αφαιρέσεις τη μάσκα, πλύνε τα χέρια σου πολύ σχολαστικά με σαπούνι και νερό.



10 τεμαχίων




Οι μάσκες με πιστοποιητικό CE, πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

Ιατρική μάσκα
μιας χρήσης

4,99€

Κωδ. 3497925

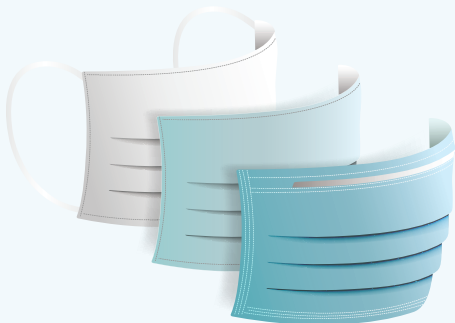

Προστασία 3 στρωμάτων



BFE ≥ 95% Αποτελεσματικότητα διήθησης βακτηρίων κατά **ΕΛΟΤ EN 14683: 2019**



Υποαλλεργικό υλικό non-woven



Αδιάβροχη



Διαστάσεις 17,5 x 9 cm



Ανάσες... ασφαλείας

Η υφασμάτινη μάσκα είναι πλενόμενη, εξασφαλίζοντας έτσι πολλαπλές χρήσεις και οικονομία.



Πριν και μετά από κάθε χρήση, την πλένουμε στους 40-60 βαθμούς και τη σιδερώνουμε σε υψηλές θερμοκρασίες.

Υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων

199€

Κωδ. 3505030, 3505243



Μαύρο ■ Μπλε ■



Προστασία
2 στρωμάτων




100%
βαμβακερή

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Το ύφασμα της μάσκας δεν περιέχει
επιβλαβείς ουσίες για τον οργανισμό

Η σωστή χρήση της μάσκας σε 6 βήματα

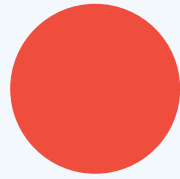

1 Πλένουμε τη μάσκα στους 40-60 βαθμούς και στη συνέχεια τη σιδερώνουμε σε υψηλή θερμοκρασία.



2 Απομακρύνουμε τους ρύπους από τα χέρια με νερό και σαπούνι ή αντισηπτικό διάλυμα, πριν τη χρήση της μάσκας.



3 Πιάνουμε τη μάσκα από τα λαστιχάκια και την τοποθετούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει την περιοχή από τη μύτη μέχρι το πηγούνι.



4 Εφαρμόζουμε σωστά τη μάσκα στο πρόσωπο, ώστε να μην υπάρχουν κενά.



5 Αποφεύγουμε να ακουμπάμε τη μάσκα κατά τη χρήση.



6 Όταν αφαιρούμε τη μάσκα, την τοποθετούμε σε ειδικό σακουλάκι μέχρι την επόμενη πλύση.



Ενισχυμένη ασφάλεια για όλο το πρόσωπο

Θωράκισε το πρόσωπό σου απέναντι στα παθογόνα σωματίδια και εξασφάλισε αποτελεσματική προστασία.



Ασπίδα προστασίας προσώπου με λάστιχο

Με αφρολέξ στο μέτωπο για άνεση κατά τη χρήση

2⁹⁹€

Κωδ. 3471144

EN 166: 2002



Με το πιστοποιητικό CE το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

Δες τι σου προσφέρει



Δε θολώνουν



Προστατεύουν από σταγονίδια και σωματίδια



Διαυγής πλευρική όραση



Εύκολος καθαρισμός και δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων



Ελαφριά κατασκευή και ευκολία στη χρήση

Πολυκαρβονικά γυαλιά προστασίας

Κατασκευασμένα από ανθεκτικό
υλικό, εύκολο στο καθάρισμα

129€

Κωδ. 3471136

EN 166: 2002



Με το πιστοποιητικό CE το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

Δες τι σου προσφέρει



Ανθεκτικά χάρη στο
υλικό κατασκευής



Δε θολώνουν



Προστατεύουν από σταγονίδια
και σωματίδια



Ελαφρύ υλικό
και ευκολία στη χρήση

Πραγματοποίησε τις αγορές σου

με **ανέπαφη παράδοση**



Μέτρηση με ένα κλικ

Μέτρησε την θερμοκρασία σου σε ένα δευτερόλεπτο, ανέπαφα και με ασφάλεια.



Ηλεκτρονικό
Θερμόμετρο
Υπερύθρων

39⁹⁰€

Κωδ. 3532569



CE 0197



Με την ανέπαφη μέτρηση αποφύγουμε τη διασπορά των μικροβίων.

Δες τι σου προσφέρει



Χρόνος μέτρησης
1 δευτερόλεπτο



Ανέπαφη μέτρηση
σε απόσταση 3-5 εκατοστών



Οθόνη LCD με 3 αποχρώσεις
πράσινο, κίτρινο και κόκκινο.



Λειτουργία
ειδοποίησης πυρετού



Μνήμη 10 τελευταίων
μετρήσεων



Διπλή λειτουργία μέτρησης
μετώπου και αντικειμένων



2 χρόνια εγγύηση

Αποτέλεσμα μέτρησης

9




Η πράσινη οθόνη επιβεβαιώνει
τη φυσιολογική θερμοκρασία
σώματος μας (μικρότερη από 37,3 °C)




Η κίτρινη οθόνη επιβεβαιώνει πως
η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ
37,4 - 37,8 °C



Η κόκκινη οθόνη ειδοποιεί για υψηλή
θερμοκρασία και συνοδεύεται
από ήχο προειδοποίησης
(υψηλότερη από 37,8°C)

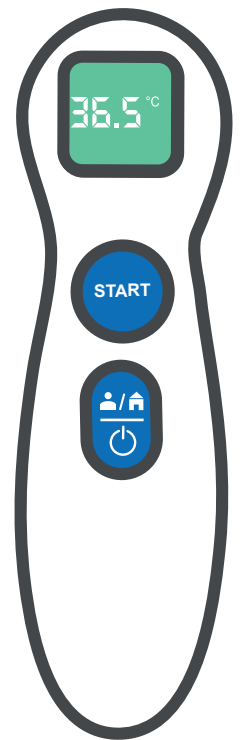

Η σωστή χρήση του θερμομέτρου σε 6 βήματα

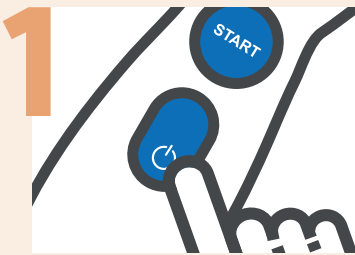


1 Πάτησε το πλήκτρο έναρξης,
για να μπει σε λειτουργία το θερμομέτρο.



2 Κράτησέ το απέναντι από το μέτωπο
σε απόσταση 3 έως 5 εκατοστών.



3 Πίεσε το κουμπί START.

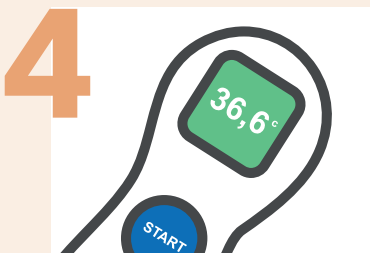

4 Στην οθόνη θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της
μέτρησης. Ανάλογα με τη θερμοκρασία
η οθόνη θα αλλάξει χρώμα.



5 Πιέζοντας εκ νέου το κουμπί START
μπορείτε να επαναλάβετε τη μέτρηση.



6 Πίεσε Ξανά το πλήκτρο έναρξης,
για να απενεργοποιήσεις το θερμομέτρο.

Ασφάλεια σε κάθε άγγιγμα

Η χρήση γαντιών αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και περιορίζει τη μεταφορά ιών και μικροβίων από μολυσμένα αντικείμενα και επιφάνειες.



Χρησιμοποίησε τα γάντια σου προσεκτικά και στοχευμένα! Δεν θα πρέπει ποτέ να αγγίζεις με αυτά προσωπικά αντικείμενα, όπως το κινητό ή τα κλειδιά σου, αλλά ούτε και εκτεθειμένα μέρη του σώματός σου.

Αφαίρεσε σωστά τα γάντια σου με 3 κινήσεις



1 Τράβηξε το γάντι από την άκρη που βρίσκεται κοντά στον καρπό, φτάνοντας μέχρι τη μέση της παλάμης, ώστε τα δάχτυλα να παραμείνουν καλυμμένα. Επανάλαβε τη διαδικασία και στο άλλο χέρι.



2 Αφαίρεσέ το πλήρως, τραβώντας το από το εσωτερικό μέρος. Γύρισε ανάποδα το γάντι, για να «εγκλωβίσεις» τη μολυσματική πλευρά. Κάνε το ίδιο και με το αντίθετο χέρι.



3 Τοποθέτησε με προσοχή τα χρησιμοποιημένα γάντια στον κάδο απορριμμάτων.



για καθημερινή χρήση

Γάντια Βινυλίου Λευκά Χωρίς Πούδρα

100 τεμαχίων
Μεγ.: S, M, L, XL

7⁹⁹€

Κωδ.: 3469220

Πραγματοποίησε τις αγορές σου

με ανέπαφη παράδοση «

Αντισηπτική προστασία

Ένα αντισηπτικό υγρό είναι σε θέση να εξουδετερώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μικροοργανισμών που βρίσκονται στα χέρια σου. Χρησιμοποίησέ το τακτικά και περιορίσε τον κίνδυνο μεταφοράς τους σε άλλα σημεία του σώματος.



Προτίμησε ένα αντισηπτικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 60%.



Μισό λεπτό αρκεί, για να το εφαρμόσεις σωστά στα χέρια σου!

Απολύμανε σωστά τα χέρια σου σε 4 βήματα



1 Εφάρμοσε το υγρό ανάμεσα στις παλάμες, ώστε να το μοιράσεις ομοιόμορφα και στα δύο χέρια.



2 Τρίψε σταυρωτά τα δάχτυλά σου και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τον αντίχειρα κάθε χεριού στην αντίθετη παλάμη, για να απλώσεις το διάλυμα με περιστροφικές κινήσεις.



3 Μετακίνησε τα ακροδάχτυλά σου στο εσωτερικό της παλάμης, μέχρι να βεβαιωθείς πως το αντισηπτικό έχει φτάσει σε κάθε σημείο της περιοχής.



4 Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα να στεγνώσουν τα χέρια σου, πριν επιχειρήσεις να αγγίξεις οποιαδήποτε επιφάνεια.



70% αλκοόλη

Καθαριστικό Gel Χεριών
με Ήπια Αντισηπτική
Δράση NV Cosmetics
35ml

059€

Κωδ. 3473988




70% αλκοόλη

Καθαριστικό Gel Χεριών
με Ήπια Αντισηπτική
Δράση NV Cosmetics
500ml

349€

Κωδ. 3473996

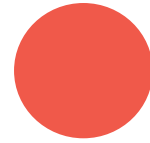

65% αλκοόλη

Αντισηπτικό
Χεριών Flost

129€

100ml

Κωδ.: 3430545

599€

750ml

Κωδ.: 3430553



Επιτοίχια
μεταλλική βάση
για αντισηπτικό

2190€

Κωδ. 3495590

Μεταλλικό stand
με βάση
αντισηπτικού

9990€

Κωδ. 3495604



Η υγιεινή παίρνει το πάνω χέρι

Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και η χρήση χειροπετσέτας σε περίπτωση φτερνίσματος ή καταρροής αποτελούν τους πιο απλούς τρόπους να προστατευθείς από όλους τους κοινούς ιούς, αλλά και από τον COVID-19.



Πλύνε τα χέρια σου αρκετές φορές μέσα στη μέρα.



Αν θες να υπολογίσεις εύκολα τον ιδανικό χρόνο απλά σιγοτραγούδησε δύο φορές το Happy Birthday!

4 βήματα για να πλένεις σωστά τα χέρια σου



1 Βρέξε καλά τα χέρια σου κάτω από τη βρύση και εφάρμοσε άφθονο κρεμοσάπουνο (2-3 πατήματα).



2 Άπλωσε το υγρό τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της κάθε παλάμης, όπως επίσης ανάμεσα στα δάκτυλα και κάτω από τα νύχια.



3 Τρίψε για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα τα χέρια, ασκώντας εντονότερες πιέσεις στα σημεία που αναφέρονται στο 2ο βήμα.



4 Ξέπλυνε τα χέρια σου με άφθονο νερό και στη συνέχεια σκούπισέ τα με χειροπετσέτα μιας χρήσης.



Κρεμοσάπυνο αντλία
Clean Workstyle
300ml

1,09€

Κωδ.: 1620614



Κρεμοσάπυνο
ανταλλακτικό
Clean Workstyle
1lt

2,39€

Κωδ.: 1620622

**Μετά το πλύσιμο, κλείσε
τη βρύση χρησιμοποιώντας
μια χειροπετσέτα.**



**Χειροπετσέτα Ζικζακ
Clean Workstyle**
200 Τεμαχίων

0,99€

Κωδ.: 1620746

Εργασία και ασφάλεια

Τα διαχωριστικά plexiglass προσφέρουν ασφαλή εξυπηρέτηση του κοινού και ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, ενώ οι ειδικές σημάνσεις παρακινούν τους επισκέπτες για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων και τη χρήση αντισηπτικού.



**Διαχωριστικό
plexiglass**

75 x 65 cm

49€

Κωδ. 3497674

90 x 65 cm

59€

Κωδ. 3497682

68 x 95 cm

69€

Κωδ. 3497666



14,5 x 19,5 cm

Πινακίδα
εφαρμογής
αντισηπτικού

189€

Κωδ.: 3503224

Ειδικές σημάνσεις για
τήρηση των μέτρων
προστασίας



29,5 cm

Πινακίδα
διατηρείτε
αποστάσεις

299€

Κωδ.: 3503240



Πινακίδα
περιμένετε εδώ

12,5 x 59,5 cm

299€

Κωδ.: 3503259

Η UV προστασία σου λύνει τα χέρια


Αντικείμενα και επιφάνειες, με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή, αποτελούν σημαντικές εστίες μικροβίων. Με τη δύναμη των ακτίνων UV αποστειρώνεις το 99,9% των μικροβίων εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκεσαι.



Λάμπα UV Αποστείρωσης Χώρου

299€

Κωδ. 3537609

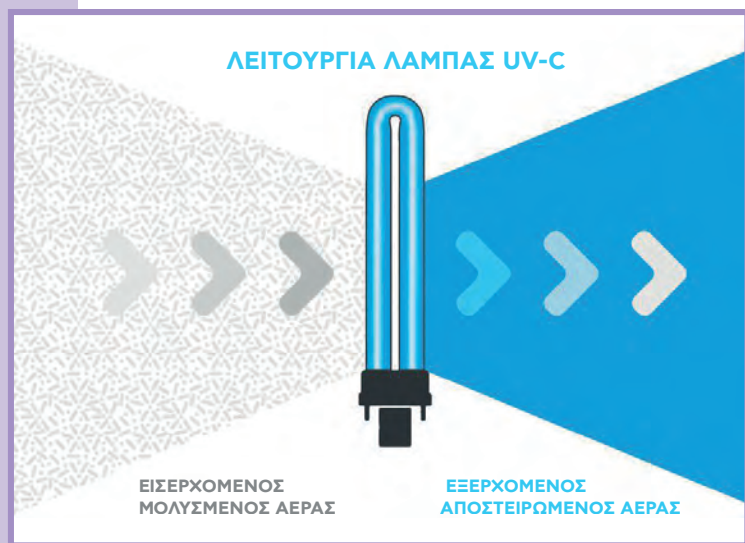

Οι ακτίνες UV-C εξουδετερώνουν **το 99,9% των μικροβίων και βακτηριδίων** φιλτράροντας αποτελεσματικά τον αέρα εντός του δωματίου. Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους αλλά και για προσωπικό σου χώρο.



Χρειάζεται 4 ώρες για να αποστειρώσει πλήρως τα 50 τετραγωνικά μέτρα



Τοποθετείται στο έδαφος αλλά και σε τοίχο.
Διαστάσεις 10x47,5 cm



UV Αποστειρωτής Turbo-x

Αποστειρώνει μέσα σε 10 λεπτά κινητά και μικροαντικείμενα.

44^{90€}

Κωδ.: 3451283



Εξωτερικές διαστάσεις
21,8 x 12,2 x 5,3 cm

Εσωτερικές διαστάσεις
18 x 10 x 22 cm



Σύνδεση
με USB



UV Τσάντα Αποστείρωσης Sentio

Αποστειρώνει όλα τα προσωπικά σου αντικείμενα μέσα σε 3 λεπτά

59^{90€}

Κωδ.: 3507572



Εξωτερικές διαστάσεις
23,5 X 11 X 24 cm

Εσωτερικές διαστάσεις
22 X 10 X 20 cm



Σύνδεση
με USB



Ράβδος Αποστείρωσης 59S X5

Ελαφρύ και φορητό stick αποστείρωσης.

99€

Κωδ.: 3493946



Εφαρμόζεται απευθείας σε όλες τις επιφάνειες.



Διαστάσεις
22 x 11 x 7 cm



Μία αόρατη ασπίδα προστασίας

Μέσα από έρευνες έχει διαπιστωθεί πως ο COVID-19 μπορεί να παραμείνει σε επιφάνειες από μερικές ώρες, μέχρι και ολόκληρες μέρες. Γι' αυτό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς απολυμαντικό spray ή και πανάκια, για τον καθαρισμό του πάγκου εργασίας, του γραφείου και κάθε λείας επιφάνειας.

Απολυμαντικό Spray 4 σε 1 με Αντιμικροβιακή Δράση Velvet

750 ml

299€

Κωδ.: 3470717



Καθαριστικό
για τους χώρους
κουζίνας CIF

750 ml

309€

Κωδ.: 3378012



Καθαριστικό γενικής
χρήσης multisurface
aerosol CIF

400 ml

349€

Κωδ.: 3377954



Καθαριστικό
για επιφάνειες
Durostick

750 ml

669€

Κωδ.: 3459853



Πανάκια Γενικού Καθαρισμού Cif Professional

100 τεμαχίων

269€


Κωδ.: 3378039



Κυψελωτή επιφάνεια αποτελεσματικά καθαρισμό επιφανειών



Άρωμα φρεσκάδας

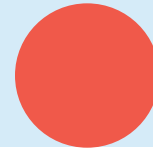

70% αλκοόλη

Καθαριστικά Μαντηλάκια για Επιφάνειες

100 τεμαχίων

1490€

Κωδ.: 3456935



Υγρά Πανάκια Καθαρισμού Λεμόνι Klinex

36 τεμαχίων

379€

Κωδ.: 3428249

πλαισιο ●

Η ασφάλειά μας περνάει από το χέρι μας



Το Πλαίσιο μένει πάντα δίπλα σου με:



plaisio.gr

Κάνε τις παραγγελίες σου 24/7 στο plaisio.gr εύκολα και με ασφάλεια



Live Chat

Μιλά με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη μας για να σου λύσει οποιαδήποτε απορία



Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Κάλεσέ μας στο 210 2895000 ή 800 11 12345 και θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε



Ανέπαφη & Άμεση Παράδοση

Οι οδηγοί μας τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας και είναι εξοπλισμένοι με γάντια και αντισηπτικά